



<b>Avsändarens adress:</b>	<b>Patientens namn och personnummer:</b>
<b>Fakturaadress:</b>	<b>Organisationsnummer:</b>

Läkare: \_\_\_\_\_ Diagnos: \_\_\_\_\_

Provtagningsdatum: \_\_\_\_\_ Tid: \_\_\_\_\_

Datum för senaste dos: \_\_\_\_\_ Tid: \_\_\_\_\_

**Aktuell behandling:**

- Avonex
- Betaferon
- Rebif 22µg
- Rebif 44µg
- Extavia

Behandlad med interferon beta antal månader:.....

- Behandling avslutad sedan (ange i månader):.....

**Anledning till provtagning:**

- Rutinkontroll
- Tidigare NAb positivt prov
- Nya MRI-lesioner
- Försämring
- Annan orsak:.....

Provet kommer att sparas i en biobank och användas för framtida forskning, utvärdering och utbildning. Kryssa i här om patienten inte godkänner att provet sparas i biobank.

**Provtagningsinstruktioner, se remissens baksida!**

## **Provtagning för analys av neutraliserande antikroppar mot Interferon Beta**

### **Serum**

- Prov tas tidigast 36 tim efter injektion eller direkt före nästa.
- 10 ml blod tas som en venpunktion i serumrör.  
Röret bör vändas 5-10 gånger och stå upprätt 30 min.
- Röret ska centrifugeras ca 2000xg i 10 min (inom 3 timmar efter provtagning).
- Efter centrifugering skall minst 1-2 ml föras över i sterilt polypropylenrör och förvaras i kylskåp i väntan på transport. Om transporten dröjer mer än en vecka skall provet förvaras i -20°C.

### **Transport**

- Provet måste sändas fryst om det har varit fryst (för att undvika frys-tining). Vid förvaring in kylskåp sänds provet i rumstemperatur.
- Laboratoriet tar endast emot prover som skickats må-torsdag och alltså kommer till laboratoriet under kontorstid och ej i anslutning till helg.
- Proverna skickas till:  
Provinlämningen L7:00  
Karolinska Universitetslaboratoriet  
171 76 Stockholm
- Vid frågor var vänlig kontakta:

Anna Mattsson

tel: 08-517 702 58

**Anna.G.Mattsson@ki.se**

Docent Anna Fogdell-Hahn

tel: 08-517 702 51

**Anna.Fogdell-Hahn@ki.se**

### **Prover skickas till:**

Provinlämningen L7:00  
Karolinska Universitetslaboratoriet  
171 76 Stockholm